

Handout zur Anwendung des Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

1. benötigte Materialien

- Testkit, bestehend aus:
 - verpackter Einwegtupfer,
 - verpackte Testkarte,
 - Extraktionsröhrchen mit Flüssigkeit,
- Stoppuhr / Handy / Armbanduhr mit Sekundenzeiger.



2. vorbereitende Tätigkeiten

- ca. 30 Min vor dem Tests nicht essen / trinken / rauchen / Kaugummi kauen,
- das Testkit muss Raumtemperatur (15–30°C) haben,
- der Test sollte bei Raumtemperatur (15–30°C) durchgeführt werden,
- unmittelbar vor Test Testkarte öffnen und vor sich ablegen,
- unmittelbar vor Test Einwegtupfer öffnen, Tupferkopf nicht mit Händen berühren.

3. Entnehmen der Speichelprobe




Husten Sie tief, machen Sie das Geräusch von "kuuuu"	Legen Sie den Tupfer auf Ihre Zunge	Drehen Sie den Tupfer für 10-20 Sekunden auf der Zunge und befeuchten Sie den Tupfer mit Speichel.
--	-------------------------------------	--

4. Tupfer in Extraktionsröhrchen



• Aufschrauben des Extraktionsröhrchens • Tupfer in mit der entnommenen Probe in Extraktionsröhrchen • Tupferkopf für ca. 10 Sekunden lang (10-15 Mal) drehen und gegen Röhrchenwand drücken	• Ausdrücken des Tupferkopfes an Röhrchenwand • Entnahme des Tupfers und Entsorgung des Tupfers im privaten Hausmüll oder in separatem Abfallbehältnis (SeTaZ)	• Schrauben Sie die Düsenkappe auf das Extraktionsröhrchen.
--	---	---

5. Extraktionsflüssigkeit auf Testkarte

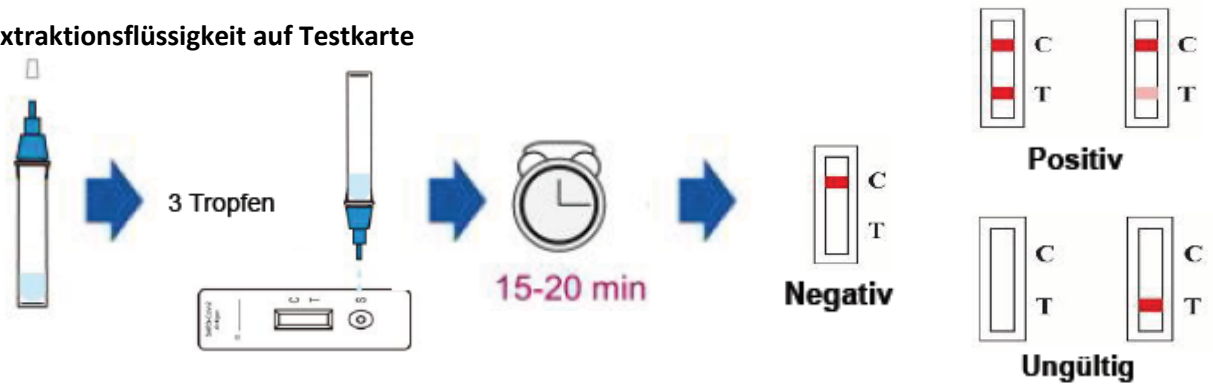

Öffnen Sie den Deckel, tröpfeln 3 Tropfen der Extraktionslösung (Speichelprobe) in die Probenvertiefung der Testkarte und starten Sie den Timer	Warten Sie 15 bis 20 Minuten	Lesen Sie das Testergebnis auf der Testkarte ab.
---	------------------------------	--

6. Interpretation Testergebnis


Vorgehensweise bei negativem Testergebnis

- eine Infektion ist nicht ausgeschlossen, daher sind die allg. Hygiene-Schutzmaßnahmen (AHA+L) weiterhin gültig und zu praktizieren,
- die Arbeit kann vor Ort fortgesetzt werden,
- der Anwender dokumentiert Testdatum, -uhrzeit und Ergebnis.



Vorgehensweise bei positivem Testergebnis

- Hinweis auf das Vorhandensein viraler Antigene
- weiterführende Bewertung erforderlich, um den tatsächlichen Infektionsstatus zu bestimmen.
- Dazu sind folgende Schritte zwingend erforderlich:
 - Anwender begibt sich unmittelbar in Isolation bzw. verbleibt zu Hause (Selbstisolation - siehe Entscheidungsbaum Fernbleiben der Arbeitsstätte),
 - Anwender meldet unverzüglich Testergebnis an Arbeitgeber (<https://kiwi.plus.aok.de/toro/resource/html#/entity.3683?previewDocumentId=75ffddbb-9da5-4a49-994f-f2c4af32fc0e&previewParentId=ENTITY%2C3683>)
 - Anwender und Arbeitgeber dokumentieren Testdatum, -uhrzeit und Ergebnis, und stimmen sich zur weiteren Arbeit ab (siehe Entscheidungsbaum Fernbleiben der Arbeitsstätte),
 - Anwender meldet unverzüglich Testergebnis an Gesundheitsamt.
 - Es ist ein zweiter Test (PCR-Test) zur Bestätigung des Testergebnisses durchzuführen (in Abstimmung mit Gesundheitsamt)
 - Anwender informiert Arbeitgeber und Gesundheitsamt über das Ergebnis des PCR-Tests und stimmt ggf. weitere notwendige Schritte ab (z.B. Quarantäne, Kontaktpersonennachverfolgung, Homeoffice)
 - Reinigung der durch den positiv Getesteten kontaminierten Bereiche, bevor eine weitere Nutzung der Bereiche erfolgt.

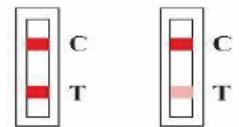

Vorgehensweise bei ungültigem Testergebnis

Ungültige Testergebnisse sind nicht zu melden.
Es wird empfohlen, den Test zu wiederholen.

